

# Телефонная трубка DP-201N



Этикетка (01.11.11)

## Назначение

Абонентское переговорное устройство DP-201N предназначено для ведения переговоров между медсестрой и пациентом. DP-201N обеспечивает двустороннюю дуплексную связь по двухпроводной линии. Изделие предназначено для работы в составе комплекта оборудования «HostCall-NM/NP». Подробное описание изделия смотрите в паспорте на систему «Hostcall-NM/NP».

## Технические характеристики

Телефонная трубка DP-201N состоит из собственно телефонной трубки и корпуса (подставки), соединённых витым шнуром.

В комплектацию трубки входит монтажная рамка для установки трубки DP-201N на вертикальную поверхность.

На верхней поверхности корпуса находится кнопка с символом «ключ», предназначенная для подачи вызывного сигнала «гонг». Одновременно этот сигнал будет слышен в телефонной трубке. На боковой поверхности корпуса находится переключатель громкости входящего вызова.

На нижней поверхности корпуса имеется 6 клемм для подключения к трубке линейного кабеля.

Режим эксплуатации - круглосуточно, в помещении при температуре от +5°C до +45°C и влажности не более 80% при нормальном атмосферном давлении;

Срок службы - не менее 5 лет.

## Подключение

Нумерация и назначение клемм в DP-201N:

Клемма	Назначение клеммы
1	Разговорный тракт
2	Разговорный тракт
3	+12В
4	-12В
5	Сигнал вызова на трубку
6	Сигнал вызова на трубку

## Правила хранения

Изделие должно храниться в штатной упаковке в помещении при температуре от 0°C до +45°C и относительной влажности до 80%.

После хранения изделия в холодном помещении или транспортирования в зимнее время, перед включением рекомендуется выдержать изделия 3 часа при комнатной температуре. Его установка должна производиться силами специализированных монтажных организаций.

## Транспортировка

Изделие в упакованном виде может транспортироваться автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом в отапливаемом отсеке.

## Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 36 месяцев со дня продажи. Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно производить устранение дефектов, произошедших по вине изготовителя. Изготовитель не несет ответственности по обязательствам торгующих организаций и не обеспечивает доставку отказавшего изделия.

В случае отказа в работе изделия в период гарантийного срока по вине изготовителя необходимо составить технически обоснованный акт об отказе и вместе с изделием отправить в адрес изготовителя для анализа, принятия мер в производстве и ремонта изделия. Срок ремонта в случае отсутствия указанного акта увеличивается на время диагностики отказа.

Начало гарантийного срока исчисляется от даты продажи изделия, которую покупатель должен подтвердить платёжными документами.

Ремонт и техническое обслуживание изделия производится по адресу: 117452, г. Москва, Внутренний проезд, д. 8, стр. 2.

**ООО «СКБ ТЕЛСИ»**

Г. Москва

Тел./факс: (495) 730-55-72

<http://www.telsi.ru>